


Bischoff & Bischoff


Mode d'emploi

VFG
GS-R/L



Enjoy mobility.

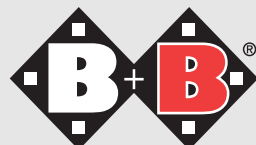

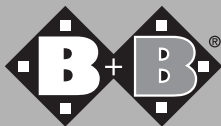

VFG (Canne quadripode)

GS- R/L (Canne pour droitier et gaucher)

Chère cliente, cher client,

Le présent mode d'emploi vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de votre aide technique à la marche B+B et d'acquérir ainsi toute l'assurance nécessaire à son utilisation.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie et une meilleure mobilité avec notre produit.

1. Réglage de la hauteur des pieds

- Desserrez la bague.
- Appuyez sur le bouton ressort et amenez la canne dans la position orthopédique souhaitée.
- Laissez le bouton ressort s'enclencher.
- Revissez la bague.

2. Attention - Cnsignes de sécurité - Analyse des risques conforme à DIN EN ISO 13485

- Portée maximale 100 kg!
- Vérifiez la solidité des assemblages par emboîtement.
- Conseils pour le réglage de la hauteur:
- Vérifiez que le bouton ressort est correctement positionné!
- Vérifiez que la bague est correctement vissée.
- À utiliser uniquement sur des surfaces planes et solides!

3. Caractéristiques techniques

	VFG	GS-R/L
Poids	0,8 kg	0,3 kg
Hauteur	74-97 cm	74-97 cm
Positions	10	10
Coloris	Bronze anodisé	Bronze anodisé

Coupon de garantie

(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

Typ: VFG / GS-R/L

Numéro de série:*

(à compléter par le revendeur)

Revendeur:

Date et tampon

* Les références se trouvent sur les côtés du châssis.

B+B France S.A.R.L.

2 rue Hélène Boucher • Parc Ariane - Immeuble Saturne • F-78280 Guyancourt

Tél.: +33 0800/79 90 79 90 • Fax: +33 (0)1 61 38 35 89

www.b-bfrance.fr

contact@b-bfrance.fr

constructeur: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

