


**Bischoff & Bischoff**


Mode d'emploi

**Varadero**



Enjoy mobility.

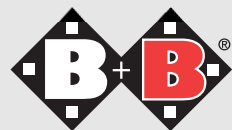

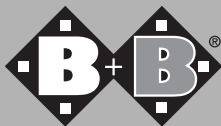

## **Siège de douche Varadero (sans dossier)**

**Chère cliente, cher client,**

L'aide pour la douche B+B que vous venez d'acquérir est un produit allemand de grande qualité dont les fonctionnalités professionnelles sont largement reconnues.

Le présent mode d'emploi vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de votre aide pour la douche B+B et d'acquérir ainsi toute l'assurance nécessaire à son utilisation.

Nous espérons que notre produit vous apportera une grande satisfaction!

### **1. Déclaration de conformité**

B+B déclare en sa qualité de fabricant que le siège de douche « Varadero » est totalement conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE.

### **2. Données relatives à l'utilisation du produit**

Le siège de douche « Varadero » est uniquement conçu pour la position assise pendant la douche.

### **3. Usage conforme - indications**


Démarche/maintien instable en cas de réduction/absence fonctionnelle des extrémités inférieures (exemple: perte de force due à une affection maligne, maladies cardiovasculaires et pulmonaires chroniques) avec maintien diminué du tronc.

### **4. Attention - Consignes de sécurité - Analyse des risques conforme à DIN EN ISO 13485**

- Pour s'asseoir et se lever, une tierce personne est nécessaire.
- Réglez les 4 pieds du siège à la même hauteur
- Vérifiez la solidité des clips d'arrêt.
- Attention lors de la fixation de l'assise sur le cadre:  
Risque de pincement.
- Assise uniquement prévue pour s'asseoir.


## 5. Assemblage et montage

Insérez la partie latérale dans le cadre de siège et fixez-le par le bas avec les vis taraudeuses (voir figures 1 et 2).

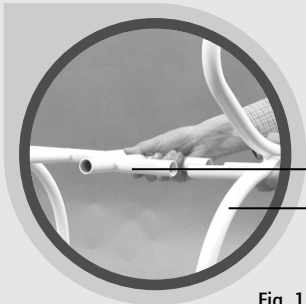

Cadre de siège  
Cadre latéral

Fig. 1

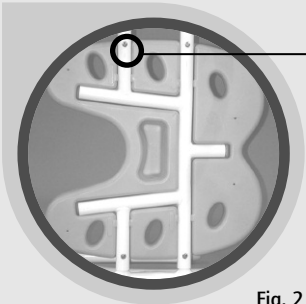

Vis taraudeuse

Fig. 2

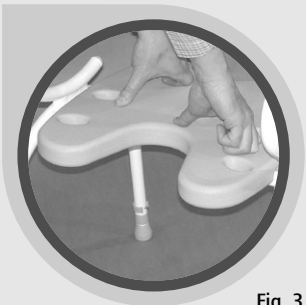


Fig. 3

Pour installer le siège sur le cadre, enfoncez-le fortement (voir figure 3).

Pour une assise confortable, les poignées et l'évidement doivent être tournés vers l'avant. (Figure 3).

Pour démonter le siège, tenez au niveau du cadre latéral et retirez le siège du cadre (voir figure 4).

Attention!

## 6. Réglage de la hauteur de l'assise

La hauteur des pieds peut être réglée sur 5 positions (plage de réglage : 10 cm). Pour cela, retirez le verrou et réglez la position souhaitée.

Après le réglage de la hauteur souhaitée, insérez le clip dans l'orifice prévu (voir figure 5 et 6)

Les quatre pieds doivent être réglés à la même hauteur!

## 7. Nettoyage et désinfection du siège de doucheol

Pour nettoyer et désinfecter le siège, utilisez un produit du commerce.

## 8. Outils de réglage/réparation

- 1 x tournevis cruciforme
- 1 x clé Allen n°5



Fig. 4

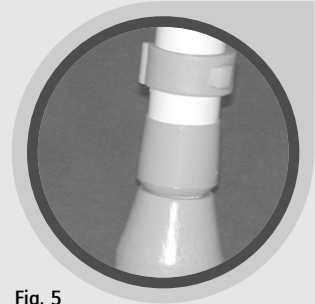


Fig. 5


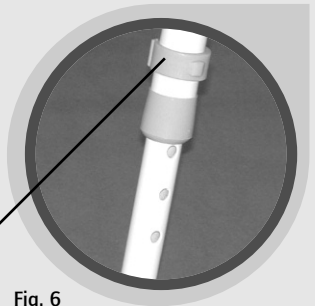


Fig. 6

Clip de sécurité

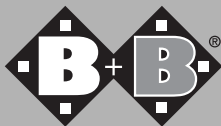

## **9. Caractéristiques techniques**

- Poids maximal autorisé: 120 kg
- L / P / H (en mm): 510 / 520-540 / 661-761
- Poids: 3,5 kg
- Hauteur du siège: 455 – 555 mm 5 positions avec clip
- Largeur/profondeur de l'assise: 400 / 400 mm
- Résistance à la chaleur: jusqu'à 125 °C
- Coloris: bleu ou blanc

## **10. Identification du produit**

Le cadre du produit présente une étiquette d'identification avec la désignation du produit, le numéro de série, le poids maximal de l'utilisateur et l'adresse du fabricant

## **11. Garantie**

La garantie s'applique uniquement si les conditions d'utilisation et de destination du produit sont respectées.

Tout renvoi du produit doit se faire dans l'emballage d'origine

## **12. Livraison du modèle de série**

1/1 x cadre latéral gauche/droite

1 x cadre de siège

1 x assise B+B (plastique)

4 x tubes télescopiques

4 x chevilles de sécurité

1 x jeu de vis

## Coupon de garantie

(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

**Produit:** Siège de douche Varadero

**Numéro de série:\***

(à compléter par le revendeur)

**Revendeur:**

**Date et tampon**

\* Les références se trouvent sur les côtés du châssis.

## **B+B France S.A.R.L.**

2 rue Hélène Boucher • Parc Ariane - Immeuble Saturne • F-78280 Guyancourt

Tél.: +33 0800/79 90 79 90 • Fax: +33 (0)1 61 38 35 89

[www.b-bfrance.fr](http://www.b-bfrance.fr)

[contact@b-bfrance.fr](mailto:contact@b-bfrance.fr)

## **constructeur: Bischoff & Bischoff GmbH**

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

[info@bischoff-bischoff.de](mailto:info@bischoff-bischoff.de)

